

GOOD MASK RESPIRÁTOR FFP2 NR PROTI COVID-19

Před aplikací je nutné zkontrolovat nepoškozenost respirátoru a jeho balení. Respirátor je třeba nasazovat vždy na hladkou (tedy oholenou) tvář a zajistit jeho nejlepší kontakt s obličejem. Těsnost respirátoru je nezbytná pro jeho správnou filtrační funkčnost. Standardní používání respirátoru je omezeno na jednu směnu (tj. 8 hodin). V případě používání respirátoru v mikrobiologicky silně aktivním prostředí (bakterie / viry) se tento čas, vzhledem ke kontaminaci pracovního prostředí, výrazně zkracuje. Tento respirátor je vyroben na ochranu před COVID-19 podle doporučení Světové zdravotnické organizace. Na toto použití je nominální ochranný faktor stejný jako nominální ochranný faktor FFP2 definovaný v EN 149: 2001 +

Uchovávejte při teplotě od 10 °C do 30 °C při vlhkosti do 50%. Nevystavujte pímému slnečnímu záření.

JEDNORÁZOVÉ POUŽITÍ



Tento výrobek byl vyroben v souladu s nařízením EU 2016/425, pro základní použití, PPE-R / 02.075 verze 2 o ochranných prostředích dýchacích orgánů na ochranu pouze proti COVID-19. Požadavky a zkoušky značené v souladu s certifikátem č. 0161 / 2020EC4256 / AITEX, Plaza Emilio Sala n° 1, Alcoi, Španělsko, označený subjekt 0161.

GOOD MASK GM2 RESPIRÁTOR

Výrobce: GOOD MASK

A1: 2009. Respirátor není filtrační polomaskou pro obecné použití a není vhodný k použití pro jiné účely než na ochranu před COVID-19. Respirátor neposkytuje žádnou ochranu proti plynum. Množství kyslíku v prostředí při používání respirátoru musí být minimálně 17%. Výrobek není odolný vůči ohni a nesmí se používat v prostorech s otevřeným ohněm a prostorech s nebezpečím výbuchu. Výrobce negantuje uvedené filtrační vlastnosti respirátoru, který je mechanicky poškozen. Před použitím je vždy nutné zkontrolovat, zda u výrobku nebyla překročena doba expirace. Nesterilizujte, nedezinfikujte. Po použití zlikvidujte jako infekční materiál. **Pozorně čtěte návod k použití.**

Datum poslední revize: 20.11.2020

Naměřená hodnota: SPLNIL

Klasifikace	95 l/min % Max.
FFP2	6



Norma EN 149: 2001 + A1: 2009 je vodícím parametrem pro posuzování standardů FFP2, neplatí pro RFU PPE-R / 02.075 verze 2 od finální platnosti pro metodu certifikace COVID-19, v níž se posuzuje jen její splnění.

